



Cerrahi Dışı Yüz ve Vücut Kontürlene Sistemi



#### VLift Specification

Energy Adjustment	30-75 Speed, Continuously Adjustment
Step Length	5 Speed
Working Frequency	230Khz + 20Khz
Shots	525 Shots, Each Shot Shoot 576 Points
Output Power	Not More Than 580VA
Normal Operating Conditions	
Ambient Temperature Range	5C-40C
Relative Humidity Range	<80%
The Atmospheric Pressure Range	86.0kpa - 106.0kpa
Power Supply	AC 110*230V, 50HZ/60HZ



Cerrahi Dışı Yüz ve Vücut Kontürlene Sistemi



CE

# Hifu & Liposunix

Tek Platform - 2 Sistem Bir Arada



Dermoklinika Sağlık Kozmetik Elektronik  
Eğitim Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

A. Bahçeşehir 2.Kısım Mah. 12. Cad. Saygı Yapı Koop. 12U

Başakşehir - İstanbul

T. +90 212 509 40 50 F. +90 212 509 40 50

dcpharma.com.tr @ dc.pharma

199005-010BC Rev.




# Yüz Uygulamaları

Cerrahi Dışı Yüz Germe

# Vücut Uygulamaları

Cerrahi Dışı Vücut Germe


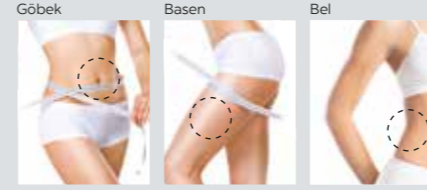


## VLift Nasıl Uygulanır?


Ameliyatsız yüz germe işlemleri arasında bulunan VLift yönteminde, Ultrasonik yüz ve boyun gençleştirme sırasında ultrason dalgalarını taşıyan uygulama başlığı cilde temas ettirilerek cilt ve cildin alt katmanlarına uygulanır. Belirlenen uygulama alanlarında, cildin 1.5mm, 3 mm ve 4,5 mm altına odaklanmış ses dalgaları ile bu bölgelerde kolajen üretimini uyaran ısı hasarları oluşturulur ve yeni kolajen yapımı uyarılarak güçlü bir sıkılaştırma etkisi meydana gelir.

• 1.5mm ~ 3.0mm • 4.5mm ~ 8.0mm • 1.3mm


Başlıklar Tamamen SMAS Dokuya Odaklı Halde Çalışır.

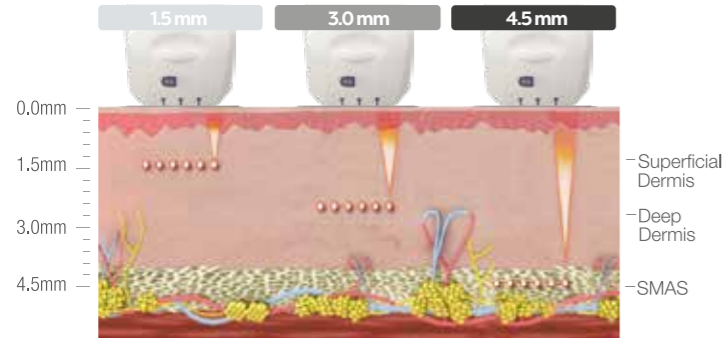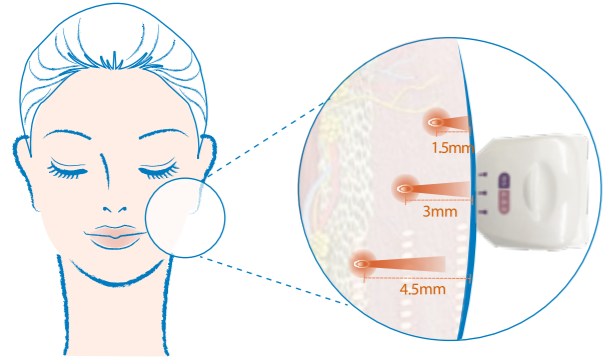

## Uygulama Alanları

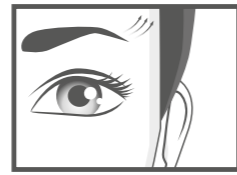


Kaş Kaldırma

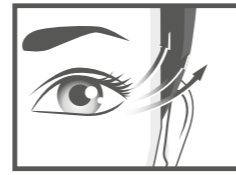


Kırışıklık Germe



V Çizgisi Şekillendirme

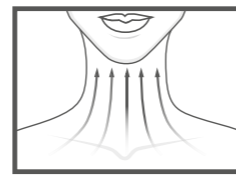

Boyun Kırışıklıkları

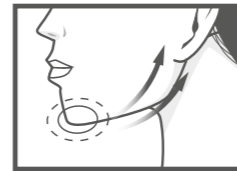

Çene Hattı Düzenleme



Alın Kırışıklıkları



## Liposunix Nedir?

Noninvasif güvenli bir ultrasonografik vücut şekillendirme ve bölgesel inceleme yöntemi olup ameliyat, kesi, iğne ve ya anestezi gerektirmez. Güçlendirilmiş dinamik odaklı ses dalgaları hedeflenen bölgede kan damarları, sinir ve cilde zarar vermeden yağ hücrelerini kalıcı olarak parçalar. Parçalanmış yağ hücrelerinin içeriği vücut tarafından metabolize edilir.

## Liposunix ile Bölgesel İnceleme

13 mm ve 8 mm derinlikte Yüksek Yoğunlukta Odaklanmış Ultrason dalgaları yağ hücreleri parçalanmakta ve bölgesel inceleme sağlanmaktadır. Cerrahi bir uygulama değildir. Uygulama sonrası günlük hayata rahatlıkla dönülür. Bir ya da iki beden küçülme sağlar. Etkisini ortalama 8-10 haftada gösterir. Göbük, Bel, Basen, Bacak ve Kol bölgelerine rahatlıkla uygulanır. Vücudunuzu acısız, güvenli ve kolayca şekle sokar.

## LIPOSUNIX'in ilk etkileri ne zaman ortaya çıkar? Kesin olarak ne kadar bir inceleme sağlar?

İlk etkileri 2. haftada gözlenir. Tüm seanslar tamamlandıktan sonra 1-2 beden inceleme sağlanabilmektedir.

